

KURZANLEITUNG FÜR DEN SELBSTTEST

Produkt: NASOCHECKcomfort SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest
 Hersteller: Beijing LEPU Medical Technology Co., Ltd.

Erste Schritte (Alle Komponenten haben Zimmertemperatur)

1

- Folie über dem Klebestreifen „K“ entfernen
- Die Testkarte muss innerhalb einer Stunde nach dem Öffnen des versiegelten Beutels verwendet werden

Probennahme

2

In jedem Nasenloch:
 Spitze des Abstrichtupfers ca. 2–3 cm einführen,
 fünfmal drehen und dabei über die
 Nasenschleimhaut führen

5 x

Behandlung der Probe

3

Spitze des Abstrichtupfers durch die Öffnung „B“ in Vertiefung „A“ schieben

4

Sechs Tropfen in Probenvertiefung „A“ geben

Danach Tupfer zweimal in jede Richtung drehen

6 x

2 x

2 x

5

Karte schließen, mit Klebestreifen „K“ zusammenkleben und vorsichtig zusammendrücken

6

Ergebnis **nach 15 min** auf der Vorderseite der Karte ablesen

Nach mehr als 20 Minuten kein Ergebnis mehr auswerten!

Auswertung der Ergebnisse

Jede Farbschattierung bei der Testlinie (T) ist als positiv zu betrachten

Negativ
 Farbige Kontrolllinie (C)

Ungültig/unklar
 Keine Kontrolllinie (C)

Positiv
 Farbige Kontroll- (C) und Testlinie (T)

Entsorgung

Verwendete Testkits gut verpackt im Hausmüll entsorgen

Schüler/-innen sowie Schul- oder Kitapersonal können zur Schule/Kita gehen

Test mit neuem Material wiederholen

- Eltern melden Kind in Schule krank bzw. Schul- oder Kitapersonal meldet sich krank
- Schüler/-innen sowie Schul- oder Kitapersonal lassen PCR-Nachtestung in einem der zentralen Testzentren durchführen



Testzentren zur PCR-Nachtestung