

KURZANLEITUNG FÜR DEN SELBSTTEST

Produkt: NADAL® COVID-19 Ag Test
 Hersteller: Nal von Minden

Erste Schritte

1 Röhrchen in eine Halterung stellen (z. B. Klammer)

2 Pufferlösung vollständig einfüllen

Probennahme (bei Zimmertemperatur)

Nase putzen, Hände waschen

3 Abstrichtupfer in beide Nasenlöcher ca. 2 cm einführen, 15 Sekunden gegen die Nasenwand drehen und dabei fünfmal über die Nasenschleimhaut führen

5 x

Behandlung der Probe

4 Abstrichtupfer einführen und drehen

Röhrchen dabei zehnmal gegen Tupfer zusammendrücken, um Antigene zu lösen

5 Tupfer unter festem Druck auf die Röhrchenwand entnehmen und Tropfkappe aufsetzen

6 Drei Tropfen in Probenvertiefung auf der Testkassette geben

7 Ergebnis nach 15 min ablesen

Nach mehr als 20 Minuten kein Ergebnis mehr auswerten!

10 x

3 x

Auswertung der Ergebnisse

Jede Farbschattierung bei der Testlinie (T) ist als positiv zu betrachten

Negativ: Farbige Kontrolllinie (C)

Ungültig/unklar: Keine Kontrolllinie (C)

Positiv: Farbige Kontroll- (C) und Testlinie (T)

Entsorgung

Verwendete Testkits isoliert im Hausmüll entsorgen

Schüler/-innen sowie Schul- oder Kitapersonal können zur Schule/Kita gehen

Test mit neuem Material wiederholen

- Eltern melden Kind in Schule krank bzw. Schul- oder Kitapersonal meldet sich krank
- Schüler/-innen sowie Schul- oder Kitapersonal lassen PCR-Nachtestung in einem der zentralen Testzentren durchführen



Testzentren zur PCR-Nachtestung